

HandiNorme

Notice de pose Siège de douche escamotable

| | |
|----------|----------|
| 688.0010 | 688.0011 |
|----------|----------|




MATERIEL NÉCESSAIRE


- 4 chevilles
- 4 vis de préférence en inox pour éviter tout risque de corrosion avec l'humidité
- 1 perceuse visseuse
- 1 niveau à bulle ou à fil

POSE


- 1.** Lire impérativement les instructions affichées sous le siège.
- 2.** Présenter physiquement le siège en position assise contre le mur à l'endroit où vous souhaitez le fixer. Attention : s'assurer que la béquille de soutien est perpendiculaire à l'assise et au sol, grâce à un niveau à bulle ou à fil. Il est conseillé de placer le siège de douche à une hauteur entre 45 et 50 cm à partir du sol, pour respecter la norme accessibilité.
- 3.** Indiquer au mur avec un crayon de papier les 4 points de perçage.
- 4.** Percer au niveau des repères de vos points de fixation à l'aide d'une perceuse-visseuse. Veiller à percer les quatre points de fixation pour optimiser le maintien.
- 5.** Choisir des chevilles et des vis adaptées à votre support mural pour éviter que la barre ne bouge. Insérer les chevilles au mur.
- 6.** Placer le siège de douche et visser au niveau des trous préalablement percés. Vérifier que le siège est bien maintenu et que les vis sont suffisamment serrées. S'assurer qu'il est facilement abaissable et relevable. Le siège est maintenant prêt à l'emploi.

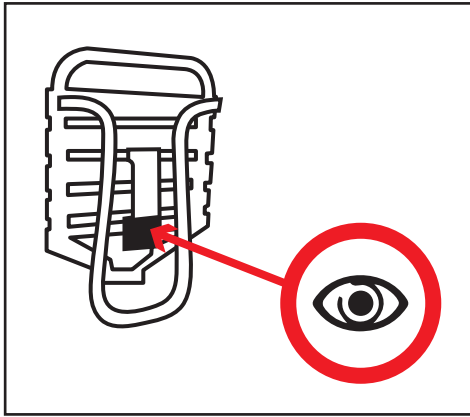


1

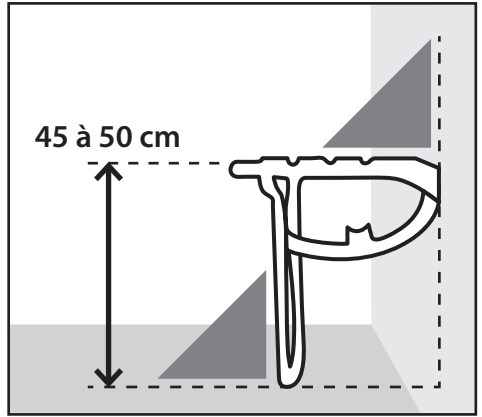


2

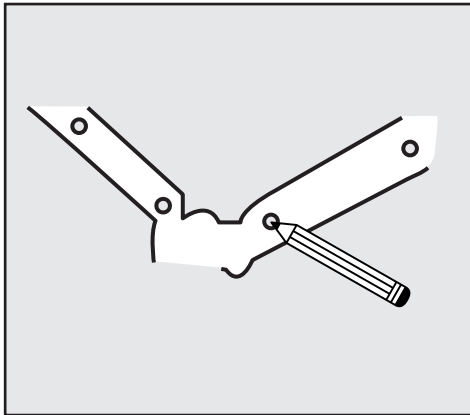


3

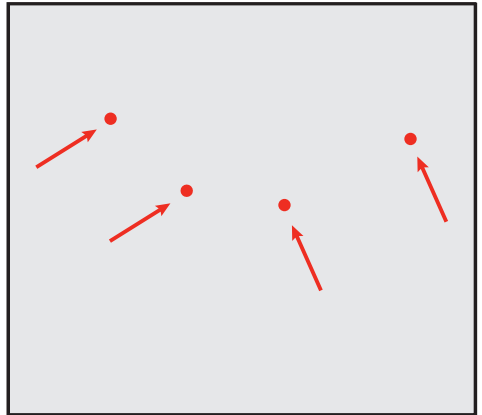

4

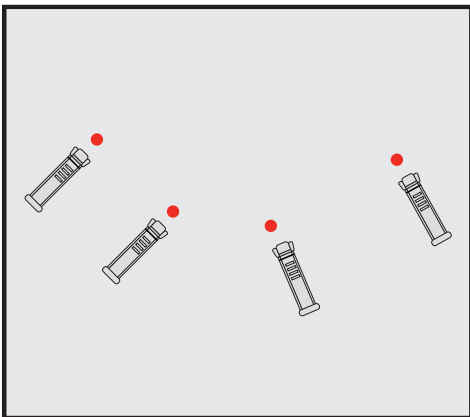

5

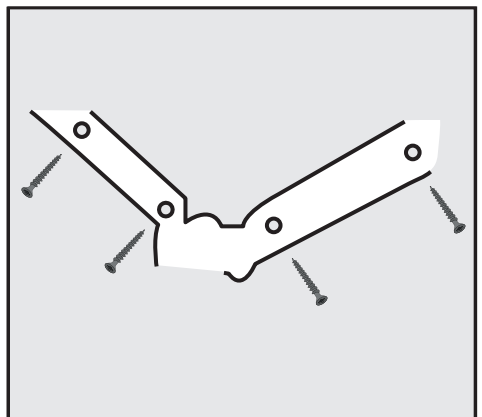

6

ENTRETIEN

Préférez un nettoyage au savon doux puis un rinçage à l'eau claire. Attention : évitez les produits de nettoyage à base de cétones, d'hydrocarbures, d'acides, de bases, d'esters et d'éthers, qui pourraient endommager la matière.

AVERTISSEMENT

Le siège de douche escamotable permet à l'utilisateur de prendre une douche en position assise. Il ne faut en aucun cas monter debout sur le siège, ou s'en servir comme barre d'appui s'il est en position relevée. Ne pas mettre les doigts dans les parties mobiles pour éviter tout risque de pincement. Les produits ne contiennent aucune substance dangereuse pour la santé.



HandiNorme

L'accessibilité des ERP

408 Rue Albert Bailly 59290 WASQUEHAL

Tél. 03 66 72 41 50 - Fax. 09 72 33 92 93

contact@handinorme.com

www.handinorme.com