


HandiNorme

Notice de pose Barre d'appui coudée BANJU

688.0083	688.0084
----------	----------

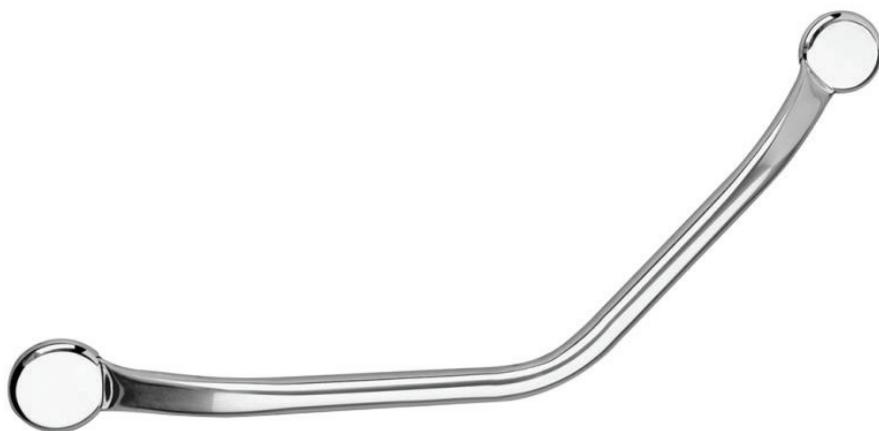

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 8 chevilles
- 8 vis (de préférence en inox pour éviter tout risque de corrosion avec l'humidité)
- 1 perceuse visseuse

POSE


1- Posez la barre d'appui à plat (A) et tirez les deux extrémités vers l'extérieur pour rendre visibles les points de fixations (B).

2- Présentez la barre d'appui contre le mur et indiquez au crayon de papier les emplacements de perçage (2.a). Il est conseillé de placer la barre à une hauteur entre 70 et 80 cm à partir du sol, pour respecter la norme accessibilité (2.b).


3- Choisissez des chevilles et des vis adaptées à votre support mural pour que la barre soit solidement fixée. Percez les points de fixation au niveau de vos repères à l'aide d'une perceuse-visseuse. **Attention : les points de fixation doivent être impérativement respectés.**

4- Insérez les chevilles au mur et fixez la barre d'appui avec les vis.


5- Vérifiez que la barre est fermement maintenue et que les vis sont suffisamment serrées. Une personne doit pouvoir s'y appuyer pour maîtriser sa descente et se relever sans risque d'arrachement. Enfin, recentrez les extrémités vers l'intérieur pour cacher les points de fixation.

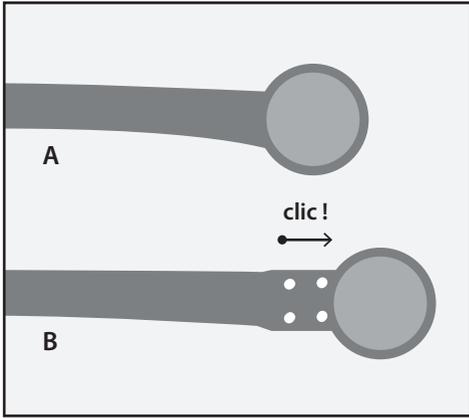


1

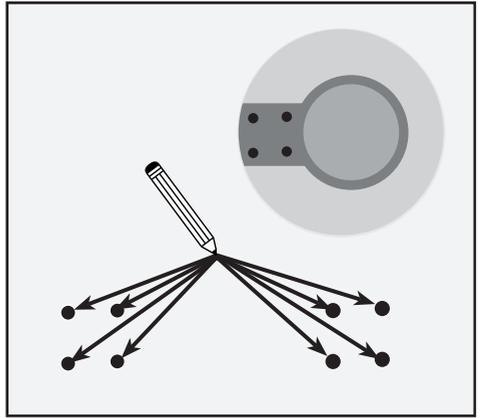


2.a

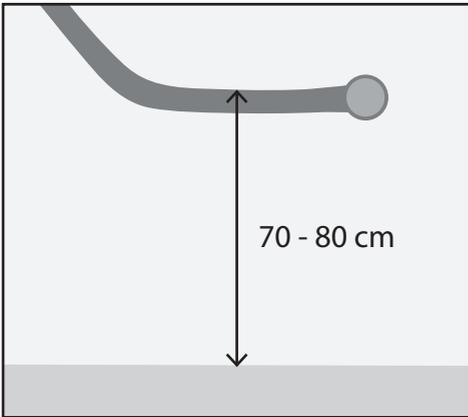


2.b

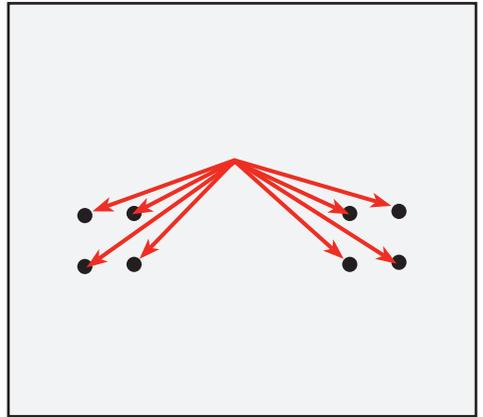

3

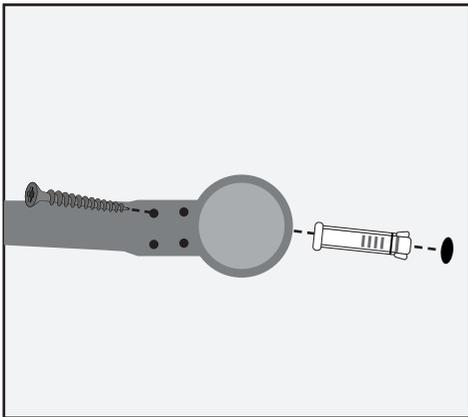

4

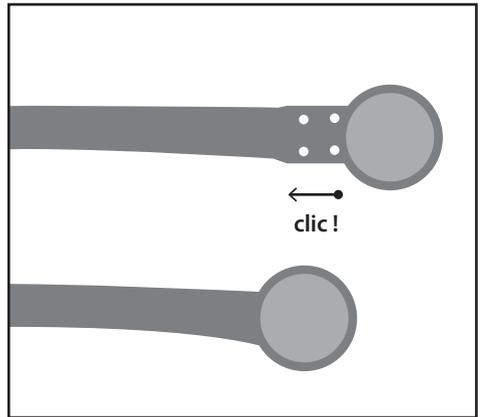

5

ENTRETIEN

Préférez un nettoyage au savon doux puis un rinçage à l'eau claire. Attention : évitez les produits de nettoyage à base de cétones, d'hydrocarbures, d'acides, de bases, d'esters et d'éthers, qui pourraient endommager la matière.

AVERTISSEMENT

La barre d'appui coudée BANJU permet une aide et une sécurité à l'utilisateur pour se baisser et se relever. Il ne faut en aucun cas s'en servir comme marche ou pour s'asseoir ou se suspendre.

Les produits ne contiennent aucune substance dangereuse pour la santé.

HandiNorme

L'accessibilité des ERP

408 Rue Albert Bailly 59290 WASQUEHAL

Tél. 03 66 72 41 50 - Fax. 09 72 33 92 93

contact@handinorme.com

www.handinorme.com