

# HandiNorme

## Notice de pose Barre de douche en T

688.0046	688.0049	688.0015
----------	----------	----------



## **MATÉRIEL NÉCESSAIRE**

- 9 chevilles
- 9 vis (de préférence en inox pour éviter tout risque de corrosion avec l'humidité)
- 1 perceuse visseuse

## **POSE**


**1-** Détachez les trois caches pour rendre visibles les supports de fixation.

**2-** Présentez la barre d'appui contre le mur et indiquez avec un crayon de papier les emplacements de perçage. Il est conseillé de placer la barre à une hauteur entre 70 et 80 cm à partir du sol, pour respecter la norme accessibilité.


**3-** Choisissez des chevilles et des vis adaptées à votre support mural pour éviter que la barre ne bouge. Une fois la barre posée, percez les points de fixation au niveau de vos repères à l'aide d'une perceuse-visseuse. Veillez à percer les trois points de fixation pour optimiser le maintien.

**4-** Insérez ensuite les chevilles au mur, la barre d'appui et les vis au niveau des trous préalablement percés.


**5-** Vérifiez que la barre est bien maintenue et que les vis sont suffisamment serrées. Enfin, repositionnez les caches par-dessus les supports de fixation.

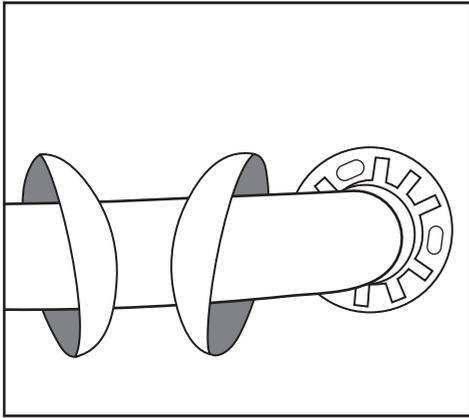


1

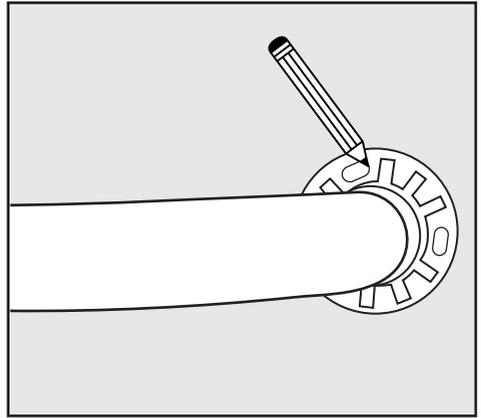


2.a

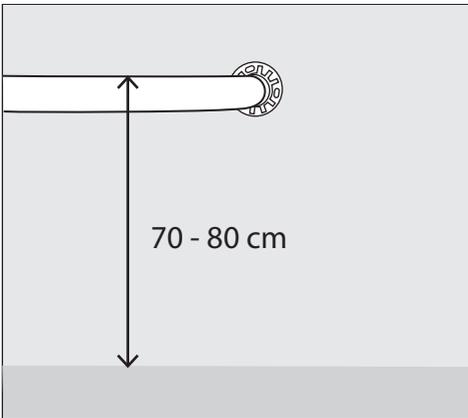


2.b

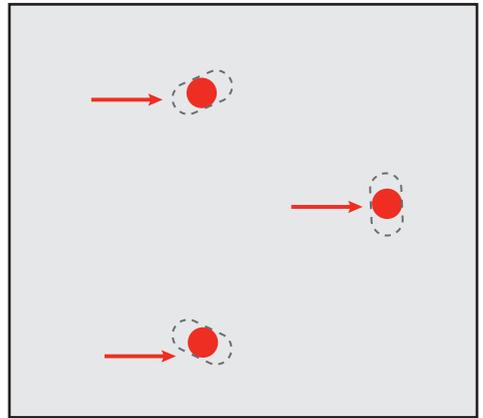

3

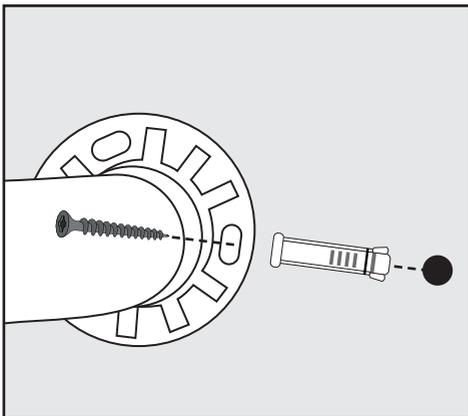

4

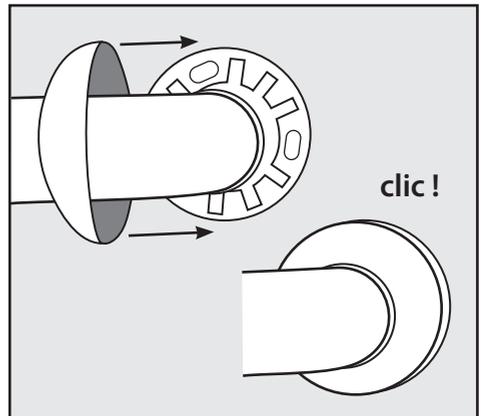

5

## **ENTRETIEN**

Préférez un nettoyage au savon doux puis un rinçage à l'eau claire. Attention : évitez les produits de nettoyage à base de cétones, d'hydrocarbures, d'acides, de bases, d'esters et d'éthers, qui pourraient endommager la matière.

## **AVERTISSEMENT**

La barre de douche en T permet une aide et une sécurité à l'utilisateur pour se baisser et se relever. Il ne faut en aucun cas s'en servir comme marche ou pour s'asseoir ou se suspendre.

Les produits ne contiennent aucune substance dangereuse pour la santé.

**HandiNorme**  
L'accessibilité des ERP

408 Rue Albert Bailly 59290 WASQUEHAL  
Tél. 03 66 72 41 50 - Fax. 09 72 33 92 93  
contact@handinorme.com  
www.handinorme.com