

## Fauteuil de transport sur roues

**AVERTISSEMENT - LA CHAISE EST CONÇUE POUR TRANSPORTER DES PERSONNES, ELLE NE DOIT PAS ÊTRE LAISSÉE SANS SURVEILLANCE OU IL PEUT TOMBER LE DOS ET BLESSE L'OCCUPANT. IL EST AVISÉ QUE TOUS LES UTILISATEURS DU PRÉSIDENT ONT REÇU LA MANIPULATION MANUELLE ENTRAÎNEMENT. LA PRÉSIDENT EXIGE UN MINIMUM DE DEUX PERSONNES POUR L'OPÉRER.**

### MODE D'EMPLOI



**1.** Retirez le fauteuil du lieu de stockage et placez-le sur le sol dans cette position.



**2.** Détachez la ceinture de sécurité.



**3.** Dépliez la poignée et insérez des épingles de sûreté de chaque côté à sécuriser.



**4.** Tenez la poignée et localisez la barre de siège dans le support sur le cadre arrière.



**5.** Transférez la personne sur son siège conformément au plan d'évacuation d'urgence personnel (PEEP), en s'assurant que la chaise est prise en charge.



**6.** Dépliez le repose-pieds si nécessaire et attachez la ceinture de sécurité.



**7.** Aux abords de l'escalier, 1 personne doit tenir la poignée à l'arrière de la chaise et 1 ou 2 personnes doivent tenir les poignées au bas de la chaise.



**8.** 1 personne doit prendre le commandement et donner des instructions pour soulever. Manœuvrez la chaise lentement et prudemment dans les escaliers.



**9.** Une fois sur le palier d'escalier, baissez la chaise en position statique et mettez-vous en place pour le prochain escalier.



10. Quand vous arrivez au rez-de-chaussée manœuvrez jusqu'à la sortie finale.

### POUR REVENIR À LA POSITION DE STOCKAGE :



1. Repliez le repose-pied en position fermée.



2. Tenez la poignée et retirez la barre de selle du support sur le cadre arrière.



3. Retirez les épingles de sûreté de chaque côté de la poignée et pliez la poignée.



4. Plus bas au sol, dans une position repliée.



5. Attachez la ceinture de sécurité autour de la chaise pliée.



6. Revenir à la position de stockage.