

Rampe instructions de montage

Consignes de sécurité :

- 1) Déroulez et enroulez la rampe verticalement puis la poser au sol
- 2) Attention à ne pas se coincer les doigts en déroulant la rampe
- 3) Ne pas marcher sur les rebords de la rampe
- 4) Assurez-vous que la première section (30 cm) de la rampe pose sur la dernière marche
- 5) N'utilisez la rampe que sur sol stable

Accessoires fournis : Clé Allen, Clé 13 mm, courroie de transport


Information générale :

La rampe Roll-a-ramp est fabriquée en aluminium anodisé de qualité aéronautique. Elle est légère, solide et adaptable. En respectant les instructions, la rampe Roll-a-ramp vous servira pendant de longues années.


Mise en place de la rampe :

Pour dérouler la rampe, mettez-la en position verticale. Une fois entièrement déroulée, la placer à l'horizontale. Pour l'enrouler, utilisez le processus inverse. Les capuchons jaunes servent de protection contre les pincements et de signalisation. Ils doivent rester en place en permanence.

Bien vérifier que l'étiquette "Bout supérieur" est en position haute, car les sections supérieures ont un rayon de courbure de 1° alors que les sections inférieures ont un rayon de courbure de 0°, ce qui permet un accès plus confortable.

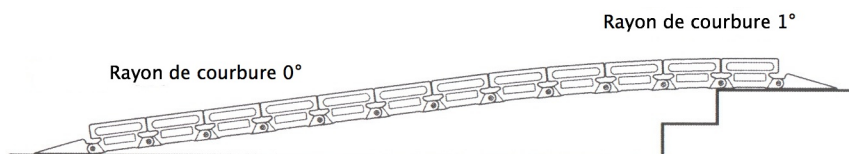


Pour assurer une sécurité maximale, il faut placer la première section de la rampe sur l'obstacle voir l'illustration.

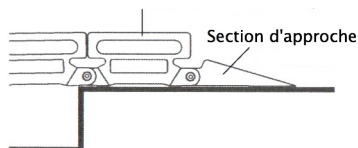

Adaptabilité :

Pour augmenter ou réduire la longueur de la rampe, utilisez la clé Allen et la clé de 13 mm ; Dévissez les vis d'une section 0° (le chiffre est indiqué sur le rebord de chaque section) puis assemblez le nombre de sections nécessaire.

Pour un rangement à plat, procédez selon l'illustration

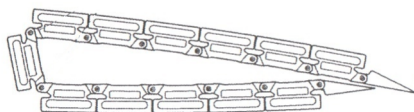

Pour une longueur supérieure à 3 m, il faut ajouter des pieds supports amovibles (en option).

Entretien :

Effectuez un entretien périodique afin de vérifier les protections jaunes et de nettoyer les traces d'huiles ou de graisses éventuelles.