

HandiNorme

Notice de pose Rampe d'accès pliable BASIK

| | | |
|----------|----------|----------|
| 318.0510 | 318.0511 | 318.0512 |
| 318.0513 | 318.0517 | |

HandiNorme
L'accessibilité des ERP

408 Rue Albert Bailly 59290 WASQUEHAL
Tél. 03 66 72 41 50 - Fax. 09 72 33 92 93
contact@handinorme.com
www.handinorme.com



PRÉCAUTIONS


Elle doit toujours être accessible afin de pouvoir aider les personnes à mobilité réduite à rentrer dans votre établissement et franchir l'obstacle situé à l'entrée. Pour la stocker, il suffit de la plier en deux et de la laisser à proximité de son lieu d'utilisation.

POSE


1. Déposer la rampe en position pliée sur sa zone d'utilisation en la transportant à l'aide de sa poignée valise.
2. Déplier ensuite la rampe tout simplement afin de rendre accessible le passage aux personnes à mobilité réduite.
3. La zone d'utilisation est maintenant accessible aux personnes à mobilité réduite.

ATTENTION ! Pour une Rampe Amovible, la pente maximal à respecter est de **10%**.


CONSEIL : Pensez à installer un Carillon d'Appel à l'entrée de votre ERP pour que les personnes à mobilité réduite puissent vous informer de leur présence.

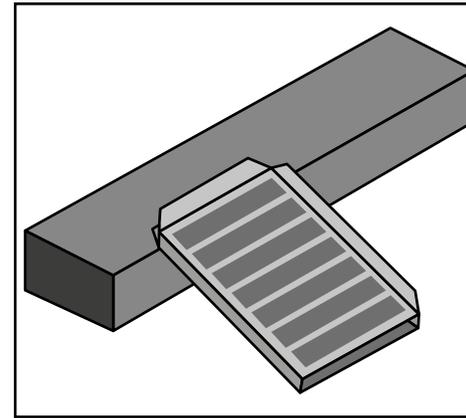

1

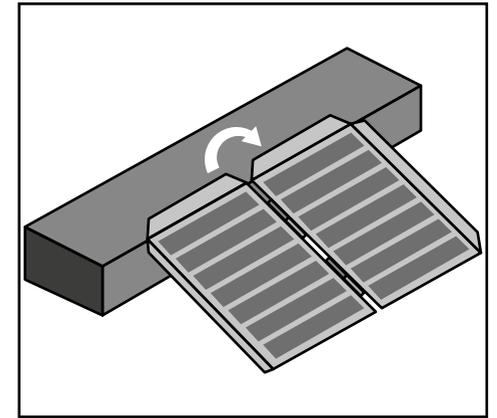

2

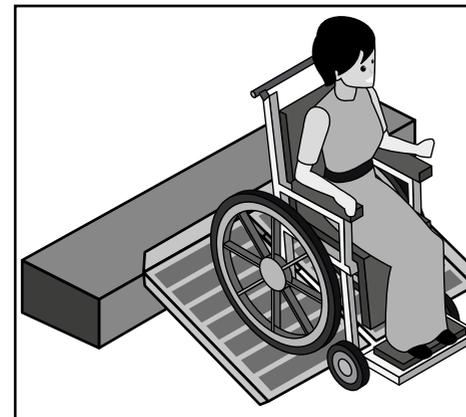

3