

Notice de pose Support mural avec sangle pour rampe pliable

318.0702



MATERIEL NÉCESSAIRE

- 6 vis de fixation
- 6 chevilles adaptées au mur
- Perçuse/visseuse


POSE

1. Fixer le support en U destiné à recevoir le bas de la rampe, dans la partie basse du mur. Attention prévoir la visserie adaptée pour supporter le poids de la rampe.


2. Insérer la sangle dans les fentes de la platine murale. Veillez à équilibrer la longueur de chaque côté afin que le clip soit centré au milieu de la rampe lorsqu'il est fermé (une fois la platine fixée au mur, la sangle ne pourra plus glisser d'un côté ou de l'autre).

3. Fixer la platine contenant la sangle, au mur, à une hauteur équivalente à la moitié de la longueur de la rampe.


4. Insérer la rampe dans le support en U et fermer la sangle autour de celle-ci.

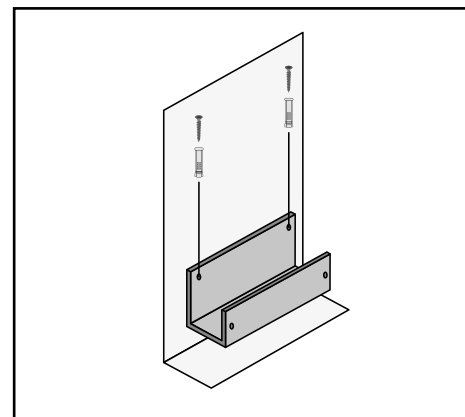


1

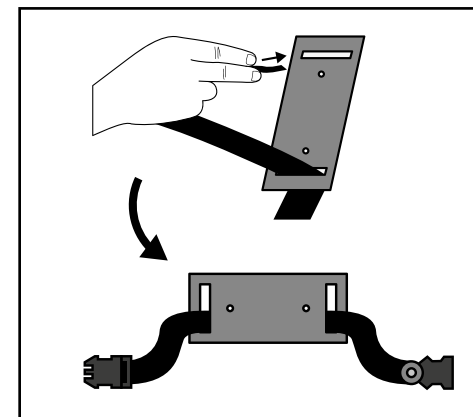

2

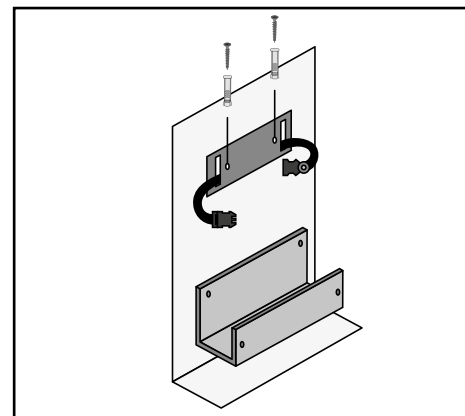

3

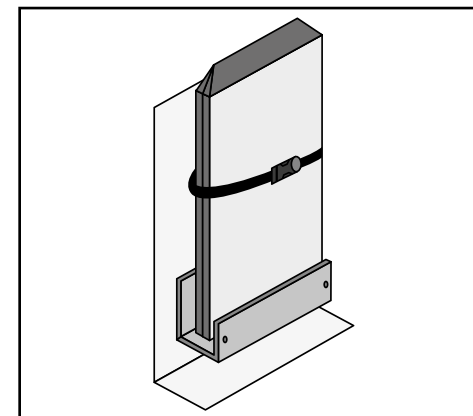

4