

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

### Sécurité

- Ne pas exposer au soleil ni exposer à une température supérieure à 40°C.
- Installer l'appareil dans un endroit aéré.
- Ne pas tenter d'ouvrir le boîtier.

### Nettoyage de la boucle

Utiliser un tissu sec pour nettoyer la coque sans aucun produit d'entretien.

### Garantie

La responsabilité d'Handinorme est limitée à la réparation ou au remplacement des pièces présentant un défaut établi de fabrication et qui nous auront été retournées franco dans un délai maximum de 1 an à partir de la date d'expédition. Notre garantie exclut l'usure normale, l'utilisation anormale ou le non-entretien.

*Pour toute demande ou en cas de dysfonctionnement, merci de contacter le service client Handinorme au 03 66 72 41 50 ou par e-mail à [contact@handinorme.com](mailto:contact@handinorme.com).*

### Raccordement électrique

Merci d'utiliser l'adaptateur 230V 50/60Hz fourni avec l'handiboucle afin d'éviter tout problème de raccordement ou de surchauffe de la carte.

### Conformité Européenne

Cette déclaration est consultable sur notre site internet [www.handinorme.com](http://www.handinorme.com).

### Un autre geste pour l'environnement

Retournez-nous votre produit usagé : la fécule de maïs du boîtier sera réutilisée pour fabriquer d'autres produits et les composants électroniques seront recyclés. Si vous ne pouvez pas nous renvoyer le produit, vous pouvez le déposer dans un bac de collecte pour produits électroniques.

# HandiNorme

L'accessibilité des ERP

Réf. 6280055



# handiboucle

## Notice d'utilisation

### SOMMAIRE

Préambule.....	2
Description .....	3
Caractéristiques techniques.....	5
Installation sur pied support.....	5
Installation par fixation murale .....	6
Montage du microphone .....	6
Utilisation .....	6
Placement .....	7
Augmentation de la zone de couverture.....	7
Informations complémentaires.....	8



03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
9h - 12h30, 13h30 - 17h



[www.handinorme.com](http://www.handinorme.com)  
[contact@handinorme.com](mailto:contact@handinorme.com)



Handinorme  
408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



09 72 33 92 93  
24h/24, 7j/7

## PRÉAMBULE

HandiNorme vous remercie pour l'achat de sa boucle magnétique d'accueil. Handiboucle est utilisable dans tous les lieux publics et professionnels. Elle s'adresse à l'ensemble des personnes malentendantes, appareillées ou non.

### Contenu du pack :

- une boucle magnétique d'accueil mobile handiboucle
- un micro
- une oreillette
- un pied support
- un autocollant symbolisant le handicap auditif
- un chargeur secteur 230 V


### Un geste pour l'environnement.

Afin d'affirmer son engagement écologique, Handinorme a souhaité vous proposer un produit 100 % fabriqué en France.

Le boîtier de l'handiboucle est en amidon de maïs, il est donc recyclable, et son aspect extra-fin permet une consommation minimale de matière.

Nous recyclons nos anciens catalogues HandiNorme en confettis pour caler la boucle magnétique dans sa boîte.

Vous pourrez aussi participer à rendre l'usage de l'handiboucle plus vertueux, en l'éteignant après chaque utilisation et en réutilisant son emballage.

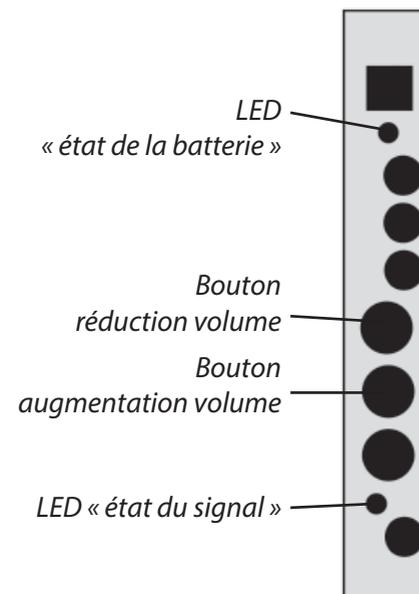

### Batterie

La LED « état de la batterie » dispose de trois couleurs.

- Vert : batterie chargée.
- Orange : batterie presque vide.
- Rouge : batterie vide.

### Réglage du volume


Adaptez le volume sonore en fonction de l'interlocuteur grâce aux 2 boutons de réglage.

### Signal

La LED « état du signal » clignote dès qu'un son est entendu par le microphone et transmis.

## PLACEMENT DE L'HANDBOUCLE

Placer la boucle magnétique face à la personne malentendante. La boucle émet dans un triangle de 1 m<sup>2</sup>. Plus la personne malentendante est proche, meilleur est le signal.

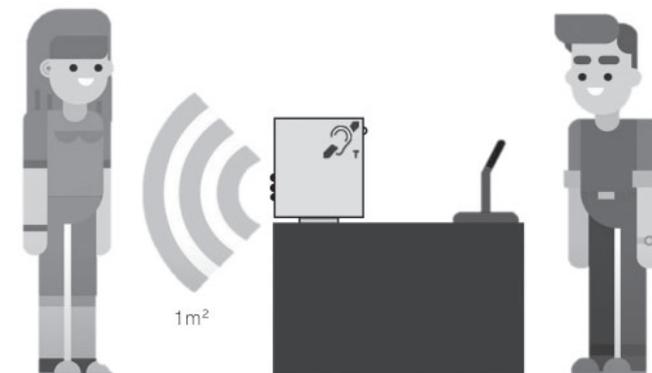


## AUGMENTATION DE LA ZONE DE COUVERTURE

Une sortie jack permet d'ajouter un adaptateur fil de cuivre sur l'appareil. Si la surface à couvrir n'excède pas 40 m<sup>2</sup>, on pourra ajouter un câble de section 0,75 mm<sup>2</sup>. Au-delà, il faudra ajouter un câble de section 1 mm<sup>2</sup>.



1. Dévisser les vis de connexion.
2. Insérer les câbles fil de cuivre.
3. Revisser les vis.


## INSTALLATION PAR FIXATION MURALE

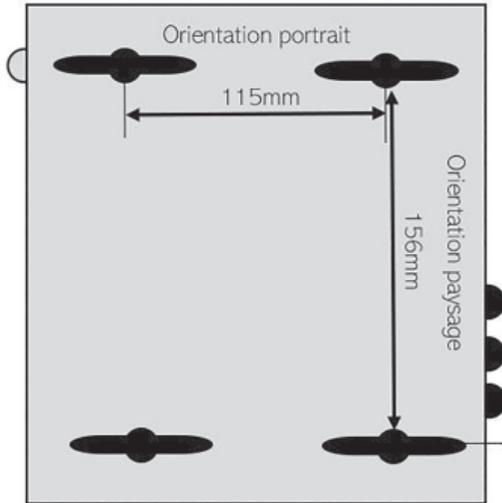

1. Choisir l'orientation souhaitée, portrait ou paysage.
2. Dessiner 2 points sur la face d'accroche murale avec un écart de 115 mm (pour une orientation portrait) ou 156 mm (pour une orientation paysage).
3. Percer et insérer 2 vis avec une tête de diamètre 3 mm.
4. Faire coulisser l'handiboucle dans les vis préalablement percées.

## MONTAGE DU MICROPHONE


1. Insérer la tige micro dans le support amovible.
2. Insérer le support amovible dans le support circulaire de table.

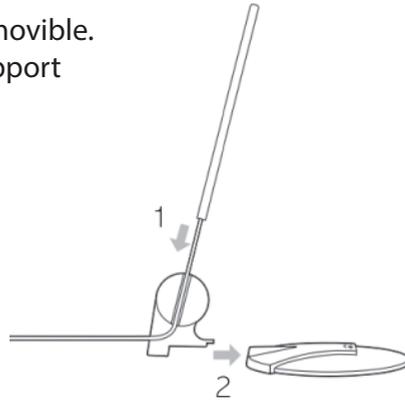


## UTILISATION

1. Brancher les composants du système (microphone,...) dans leurs entrées.
2. Brancher l'handiboucle sur secteur à l'aide de l'adaptateur 230 V ou laisser l'handiboucle sur batterie (elle dispose d'une autonomie de 8h)
3. Appuyer sur le bouton ON jusqu'à l'allumage de la LED « état de la batterie ».

## DESCRIPTION

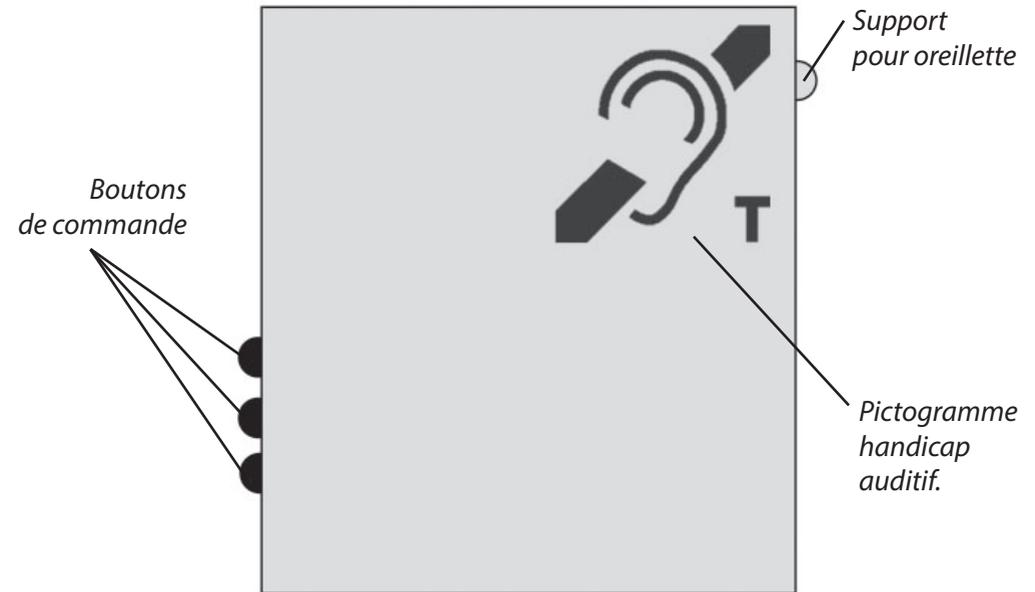

Vue de face

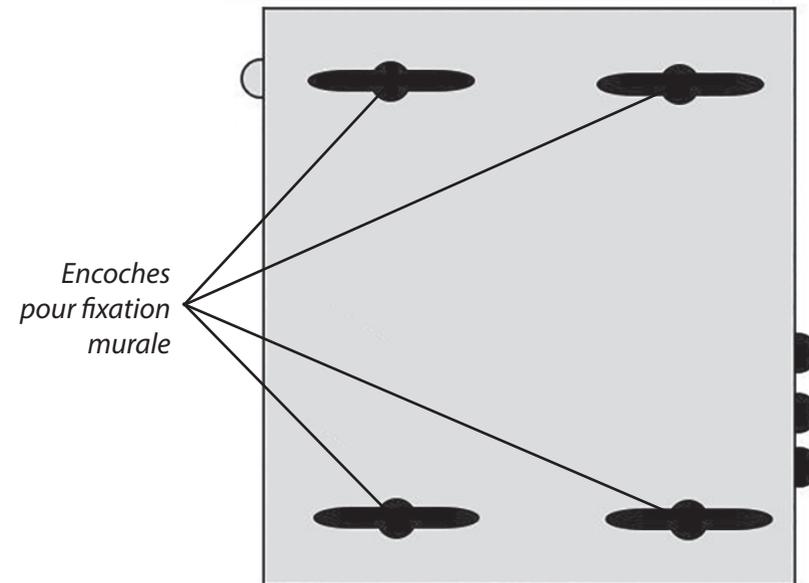

Vue de dos

HandiNorme

Face supérieure

Encoches pour pied support



Face inférieure

Support pour oreillette

Vis de fixation du capot arrière



Côté droit

Adaptateur secteur  
 LED « état de la batterie »  
 Prise microphone  
 Entrée audio  
 Prise écouteur  
 Bouton réduction volume  
 Bouton augmentation volume  
 Bouton ON/OFF  
 LED « état du signal »  
 Sortie adaptateur fil de cuivre


Vis de fixation du capot arrière

Côté gauche

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composant	Poids (Kg)	Dimensions (mm)	Descriptif
Boîtier Handiboucle	0,196	185 x 200 x 20	Couleur : Blanc Matière : Amidon de maïs Triangle d'émission : 1m <sup>2</sup>
Microphone	0,058	175 x 30	Couleur : Noir Fréquence : 30Hz – 16 KHZ Résolution : 1400 Ohm Sensibilité : -62dB ± 3dB Connexion 3.5mm stéréo plug Longueur du câble : 1,8 A m
Oreillette	0,017	80 x 50 x 30	Couleur : Noir Type de port : Supra-aural Longueur de câble : 297 cm Connexion : jack 3,5 mm
Adaptateur fil de cuivre	0,010	100x60x20	Couleur : Noir Connexion : raccord à vis + Jack 3.5mm Courant nominal : 5 A Tension nominale : 12 V/DC Nombre de pôles : 2 Forme : mâle, droit Ø extérieur : 3.5 mm

## INSTALLATION SUR PIED SUPPORT

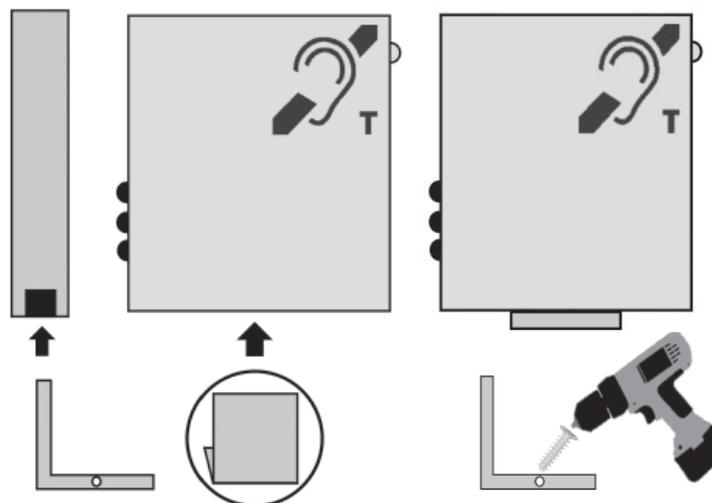

1. Insérer le pied dans la fente située sur la face inférieure de la boucle magnétique.
2. Afin de garantir une stabilité optimale, nous conseillons d'ajouter une vis dans l'encoche, ou d'ajouter un adhésif double face sous le support.