

Chaise d'évacuation Excel

Mise en service:



1. La chaise doit être à proximité de l'issue qu'elle dessert. Elle peut être suspendue aux crochets fournis ou adossée contre un mur.



2. Retirez la housse de protection et placez la chaise sur le sol.



3. Engagez le mécanisme de freinage en appuyant sur la pédale rouge, tel que montré sur l'image.



10. Placez vos mains de chaque côté de la poignée supérieure. Placez votre pied sur la barre transversale et tirez la poignée vers vous afin de mettre le fauteuil en équilibre sur les 2 roues arrière.



11. Avancez sur les 2 premières marches en veillant à ce que les patins soient en contact avec l'escalier.



12. Pour descendre la chaise, poussez la poignée vers le bas vers vos pieds, ce qui assurera un contrôle en douceur de la descente.



4. Flexionnez la sangle et ouvrez la chaise en position assise, ce qui libère le mécanisme. Assurez-vous qu'elle est bien en place, en appuyant sur la barre avec les deux verrous rouges.



5. Ouvrez le repose-pied.



6. Transférez la personne sur la chaise, fixez le harnais et abaissez les accoudoirs.



13. Une fois que vous atteignez un palier, repositionnez la chaise sur ses quatre roues. Répétez la manœuvre sur la volée de marches suivante.

RANGEMENT



14. Assurez-vous que le mécanisme de frein est verrouillé.



7. Une fois que la personne est installée, libérez le mécanisme de frein en plaçant votre pied au-dessus de la pédale rouge et poussez vers le bas.



8. Rendez-vous à l'issue de secours, en poussant la chaise avec les mains positionnées sur la poignée.



9. A proximité de l'escalier, ouvrez les 2 leviers rouges. Relevez ensuite la barre de maintien, puis refermez les 2 leviers rouges. Veillez à ce qu'ils soient bien bloqués.



15. Ouvrez les leviers rouges, abaissez doucement la poignée, puis refermez les leviers rouges jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent. Passez la ceinture de sécurité à travers et au-dessus de la poignée.



16. Répliez les accoudoirs. Libérez le mécanisme de verrouillage rouge entre les patins, appuyez la poignée supérieure vers l'avant et pliez l'ensemble de la chaise.



17. Verrouillez la ceinture de sécurité, remplacez la chaise dans son emplacement de stockage et remplacez la housse de protection.

HandiNorme
L'accessibilité des ERP

Par Courrier
27 Avenue Calmette
33600 Bordeaux
FRANCE

Par Téléphone
03 86 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h

Par Fax
09 72 33 92 93
+33 (0) 7 72 72 72

Par Internet
www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com