

Fauteuil roulant pliable CLASSIC



Description :

Le fauteuil pliable CLASSIC est destiné à un public ayant du mal à se déplacer, et ce, de façon temporaire ou permanente. Il est destiné à une seule personne et ne peut être utilisé pour transporter des charges autres.

Il peut être utilisé à l'extérieur ou à l'intérieur

Ce fauteuil peut être utilisé pour différentes personnes souffrant des handicaps suivants :

- ▶ Perte d'un membre
- ▶ Malformation d'un membre
- ▶ Paralysie
- ▶ Affections et contractions articulaire
- ▶ Mauvaise circulation du sang et insuffisance cardiaque
- ▶ Trouble de l'équilibre
- ▶ Cachexie
- ▶ Personnes souffrant de difficultés à marcher et/ou à rester debout longtemps

Pour cela le fauteuil doit s'adapter à la taille et poids de la personne (Max 130 kg), à l'état physique et psychologique, à l'environnement de vie.

Remarque :


- Ne pas utiliser sur une surface où les roues ne touchent pas le sol
- Il est nécessaire de s'entraîner sur des surfaces irrégulières et à passer des obstacles
- Le fauteuil ne doit ni être utilisé comme une échelle, ni pour le transport d'objet
- Les revêtements de sol peuvent être endommagés par le passage du fauteuil
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages dus au non-suivi des règles et instructions présentes dans cette notice

POIDS MAX DE L'UTILISATEUR	130 kg
LONGUEUR TOTALE AVEC REPOSE PIEDS	1035 mm
LARGEUR D'ASSISE EFFICACE	500 mm
LARGEUR TOTALE	700 mm
LONGUEUR PLIÉE (SANS REPOSE-PIED)	790 mm
LARGEUR PLIÉE	310 mm
HAUTEUR PLIÉ (EN FONCTION DE LA HAUTEUR D'ASSISE)	920 mm
MASSE TOTALE	17.1 kg
MASSE DE LA PARTIE LA PLUS LOURDE	10 kg
DES MASSES DE PIÈCES QUI PEUVENT ÊTRE DÉMONTÉS OU RETIRÉES	Repose-pieds : 1,70 kg; Accoudoirs : 1,20 kg; Roues arrières : 4,40 kg
STABILITÉ STATIQUE EN DESCENTE	10°
STABILITÉ STATIQUE EN MONTÉE	7°
STABILITÉ STATIQUE LATÉRALE	18°
PASSAGE D'OBSTACLE	60 mm
ANGLE DU PLAN D'ASSISE	10°
PROFONDEUR D'ASSISE EFFICACE	480 mm
HAUTEUR DE LA SURFACE D'ASSISE SUR LE BORD AVANT (MESURÉE EN HAUT DU TRAVERSE TUBES)	530 mm (530 mm -- avec 200 mm roues avant)
ANGLE DU DOSSIER	5°
HAUTEUR DU DOSSIER	440°
DISTANCE ENTRE LE REPOSE-PIED ET LE SIÈGE	500 mm
ANGLE ENTRE LA PALETTE ET LE SIÈGE	25°
ANGLE ENTRE LA JAMBE DE REPOSE-PIED ET LE SIÈGE	105°
ANGLE ENTRE LA JAMBE DE REPOSE-PIED ET LA PALETTE	80°
DISTANCE ENTRE LA MANCHETTE ET LE SIÈGE	210 mm
EMPLACEMENT AVANT DES MANCHETTES	370 mm
DIAMÈTRE DE LA MAIN-COURANTE	535 mm
EMPLACEMENT HORIZONTAL DE L'ESSIEU (FLÈCHE)	61.04 mm
DIAMÈTRE DE BRAQUAGE MINIMUM	1500 mm
DIAMÈTRE DES ROUES ARRIÈRES PU	24
PRESSIION DES PNEUS, ROUES ARRIÈRES (MOTRICES)	Ne s'applique pas
DIAMÈTRE DES ROUES DIRECTRICES PU	200 mm
PRESSIION DES PNEUS, ROUES DIRECTRICES	Ne s'applique pas
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE ET D'UTILISATION	+41 °C
HUMIDITÉ DE STOCKAGE ET D'UTILISATION	70%
NORME ISO 7176-8	Exigences et méthodes de test pour les forces statiques, d'impact et de fatigue
NORME ISO 7176-16	Résistance à l'inflammation des pièces rembourrées
COULEUR	Bleu ou gris

Règles de sécurité :

- Veillez à ne pas mettre d'objets ou de partie du corps dans le rayonnage pour éviter les blessures et endommagement du fauteuil
- Actionnez les freins de stationnement si vous vous installez ou sortez du fauteuil
- Les palettes repose pieds ne doivent pas servir à l'installation dans le fauteuil, elles doivent être tournées vers l'extérieur
- Ne pas trop se pencher sous risque de basculement
- Vérifier la largeur des passages avant de les franchir sous risque de blocage
- Utilisez en priorité les rampes mis en place
- Soumis au code de la route lorsque déplacement sur voie publique
- Ne pas utiliser le fauteuil sous effet de l'alcool
- Portez des vêtements clairs pour être repéré facilement
- Ne dépassez pas les 130 kg de charge utile

Les composants :

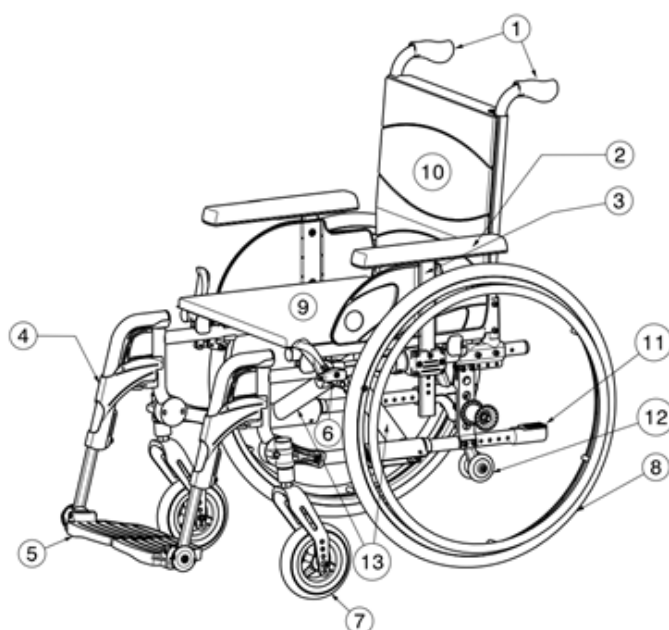

- 1 = Poignées de poussée
- 2 = Manchettes
- 3 = Accoudoirs
- 4 = Repose-pieds
- 5 = Palettes
- 6 = Freins
- 7 = Roues directrices (roues avant)
- 8 = Roues motrices (roues arrière)
- 9 = Siège
- 10 = Dossier
- 11 = Monte trottoir supplémentaire
- 12 = Anti-bascule
- 13 = Croisillon

Montage démontage :

Les roues arrières :

1. Poussez le bouton (1)
2. Montez l'essieu en laissant le bouton enfoncé
3. Relâchez
4. Vérifiez que la roue est bien bloquée




Dépliage du fauteuil :

1. Placez-vous à l'arrière du fauteuil
2. Ecartez les poignées au maximum
3. Placez-vous devant le fauteuil
4. Poussez sur les 2 tubes de l'assise vers le bas jusqu'à fixation
Attention, risque de se pincer

Placer / enlever les repose-pieds :

1. Placez-le repose pieds vers l'extérieur, et montez le repose pieds avec l'embout 1 dans le cadre
2. Tournez le repose pieds vers l'intérieur jusqu'à blocage de la position
3. Abaissez la palette

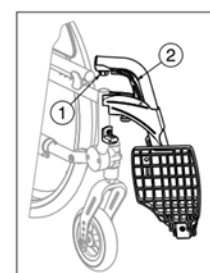


Pour enlever le repose pieds :

1. Tirez sur le levier 2
2. Tournez le repose pieds vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il ne soit plus fixé.
3. Tirez le hors du logement de tube 1

Placer accoudoirs :

1. Montez l'accoudoir 1 dans le local 2, jusqu'à ce que la vis 3 se trouve dans l'emplacement 4
2. Vérifiez que l'accoudoir est fixé fermement

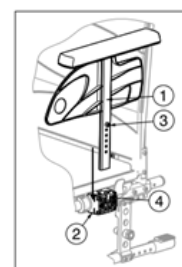

Pliage du fauteuil roulant :

1. Démontez les repose pieds
2. Saisissez l'avant et l'arrière du siège et tirez vers le haut
3. Vous pouvez aussi retirer les roues en appuyant sur le bouton 1 (voir partie « les roues arrières »)