

Référence	6380050	
Référence	6380051	
Référence	6380052	XL
Référence	6380053	XL

Fauteuil roulant pliable CLASSIC



Description :

Le fauteuil pliable CONFORT est destiné à un public ayant du mal à se déplacer, et ce, de façon temporaire ou permanente. Il est destiné à une seule personne et ne peut être utilisé pour transporter des charges autres.

Il peut être utilisé à l'extérieur ou à l'intérieur

Ce fauteuil peut être utilisé pour différentes personnes souffrant des handicaps suivants :

- ▶ Perte d'un membre
- ▶ Malformation d'un membre
- ▶ Paralysie
- ▶ Affections et contractions articulaire
- ▶ Mauvaise circulation du sang et insuffisance cardiaque
- ▶ Trouble de l'équilibre
- ▶ Cachexie
- ▶ Personnes souffrant de difficultés à marcher et/ou à rester debout longtemps

Pour cela le fauteuil doit s'adapter à la taille et poids de la personne (Max 130 kg), à l'état physique et psychologique, à l'environnement de vie.

Remarque :

- Ne pas utiliser sur une surface où les roues ne touchent pas le sol
- Il est nécessaire de s'entraîner sur des surfaces irrégulières et à passer des obstacles
- Le fauteuil ne doit ni être utilisé comme une échelle, ni pour le transport d'objet
- Les revêtements de sol peuvent être endommagés par le passage du fauteuil
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages dus au non-suivi des règles et instructions présentes dans cette notice

Référence	6380050	
Référence	6380051	
Référence	6380052	XL
Référence	6380053	XL


POIDS MAX DE L'UTILISATEUR	130 kg	
MODÈLE	L	XL
LONGUEUR TOTALE AVEC REPOSE PIEDS	1040 mm	1085 mm
LARGEUR D'ASSISE EFFICACE	500 mm	600 mm
LARGEUR TOTALE	700 mm	810 mm
LONGUEUR PLIÉE (SANS REPOSE-PIED)	1020 mm	
LARGEUR PLIÉE	310 mm	
HAUTEUR PLIÉE (EN FONCTION DE LA HAUTEUR D'ASSISE)	850 mm	940 mm
MASSE TOTALE	17.7 kg	
MASSE DE LA PARTIE LA PLUS LOURDE	10 kg	
STABILITÉ STATIQUE EN DESCENTE	10°	
STABILITÉ STATIQUE EN MONTÉE	7°	
STABILITÉ STATIQUE LATÉRALE	18°	
PASSAGE D'OBSTACLE	60 mm	
ANGLE DU PLAN D'ASSISE	0°	10°
PROFONDEUR D'ASSISE EFFICACE	440 mm	520 mm
HAUTEUR DE LA SURFACE D'ASSISE SUR LE BORD AVANT	440 mm	530 mm
ANGLE DU DOSSIER	5°	
HAUTEUR DU DOSSIER	420 mm	
DISTANCE ENTRE LE REPOSE-PIED ET LE SIÈGE	330 mm	500 mm
ANGLE ENTRE LA PALETTE ET LE SIÈGE	5°	25°
ANGLE ENTRE LA JAMBE DE REPOSE-PIED ET LE SIÈGE	105°	
ANGLE ENTRE LA JAMBE DE REPOSE-PIED ET LA PALETTE	80°	
DISTANCE ENTRE L'ACCOUDOIR ET LE SIÈGE	220 mm	240 mm
EMPLACEMENT AVANT DE LA STRUCTURE DES ACCOUDOIRS	410 mm	
DIAMÈTRE DE LA MAIN-COURANTE	535 mm	
EMPLACEMENT HORIZONTAL DE L'ESSIEU (FLÈCHE)	1.27 mm	61.04 mm
RAYON DE BRAQUAGE MINIMUM	1500 mm	
DIAMÈTRE DES ROUES ARRIÈRES PU	22	24
PRESSIION DES PNEUS, ROUES ARRIÈRE (MOTRICES)	Maxi 3.5 bars	
DIAMÈTRE DES ROUES DIRECTRICES PU	200 mm	
PRESSIION DES PNEUS, ROUES DIRECTRICES	Max 2.5 bars	
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE ET D'UTILISATION	+ 5 °	+ 41 °
HUMIDITÉ DE STOCKAGE ET D'UTILISATION	30%	70%
NORME ISO 7176-16	Résistance à l'inflammation des pièces rembourrées	
COULEUR	Bleu ou gris	

Référence	6380050	
Référence	6380051	
Référence	6380052	XL
Référence	6380053	XL

Règles de sécurité :

- Veillez à ne pas mettre d'objets ou de partie du corps dans le rayonnage pour éviter les blessures et endommagement du fauteuil
- Actionnez les freins de stationnement si vous vous installez ou sortez du fauteuil
- Les palettes repose pieds ne doivent pas servir à l'installation dans le fauteuil, elles doivent être tournées vers l'extérieur
- Ne pas trop se pencher sous risque de basculement
- Vérifier la largeur des passages avant de les franchir sous risque de blocage
- Utilisez en priorité les rampes mis en place
- Soumis au code de la route lorsque déplacement sur voie publique
- Ne pas utiliser le fauteuil sous effet de l'alcool
- Portez des vêtements clairs pour être repéré facilement
- Ne dépassez pas les 130 kg de charge utile

Les composants :

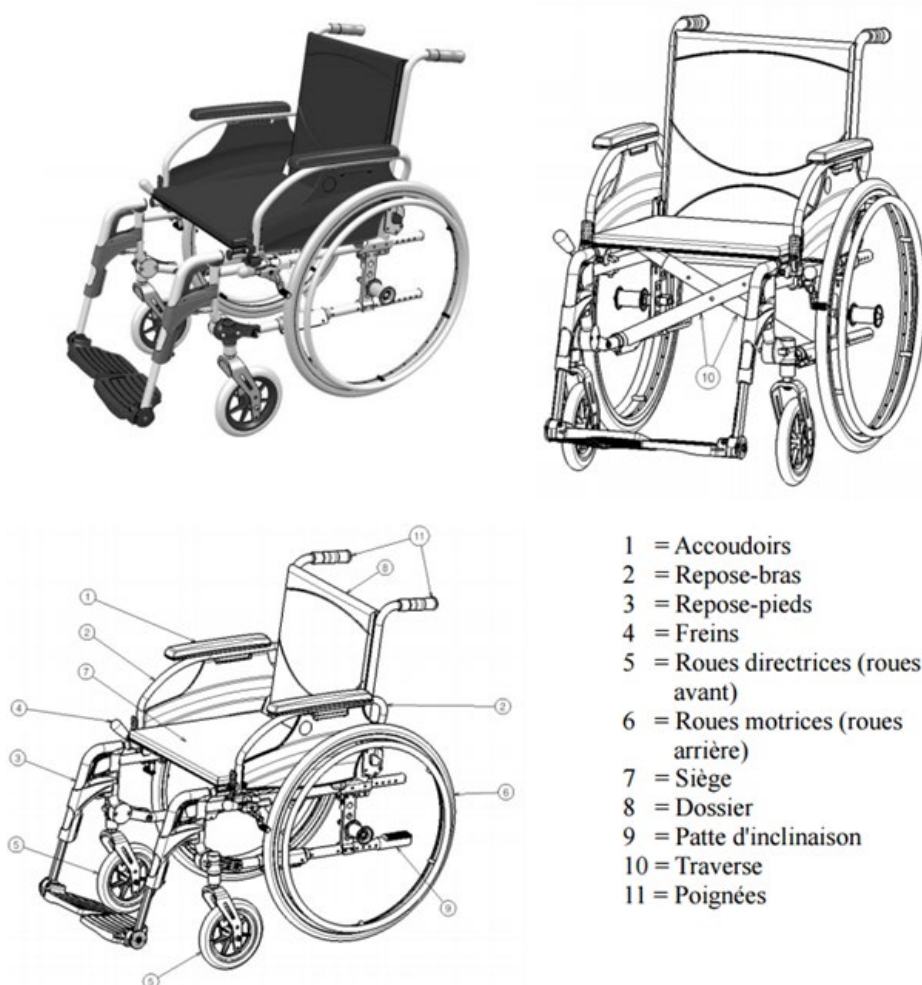

Référence	6380050	
Référence	6380051	
Référence	6380052	XL
Référence	6380053	XL

Montage démontage :

Les roues arrières :

1. Poussez le bouton (1)
2. Montez l'essieu en laissant le bouton enfoncé
3. Relâchez
4. Vérifiez que la roue est bien bloquée




Dépliage du fauteuil :

1. Placez-vous à l'arrière du fauteuil
2. Ecartez les poignées au maximum
3. Placez-vous devant le fauteuil
4. Poussez sur les 2 tubes de l'assise vers le bas jusqu'à fixation
Attention, risque de se pincer

Placer / enlever les repose-pieds :

1. Placez-le repose pieds vers l'extérieur, et montez le repose pieds avec l'embout 1 dans le cadre
2. Tournez le repose pieds vers l'intérieur jusqu'à blocage de la position
3. Abaissez la palette

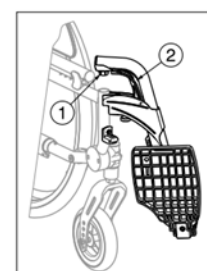


Pour enlever le repose pieds :

1. Tirez sur le levier 2
2. Tournez le repose pieds vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il ne soit plus fixé.
3. Tirez le hors du logement de tube 1

Placer accoudoirs :

1. Montez l'accoudoir dans le local 1
2. Pliez l'accoudoir vers l'avant
3. Verrouillez le tube avant de l'accoudoir dans le logement de tube 2

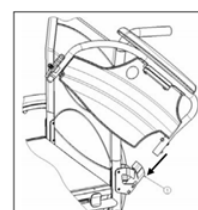

Pliage du fauteuil roulant :

1. Démontez les repose-pieds
2. Saisissez l'avant et l'arrière du siège et tirez vers le haut
3. Vous pouvez aussi retirer les roues en appuyant sur le bouton 1 (voir partie « les roues arrières »)

