

HandiNorme

L'accessibilité des ERP

NOTICE D'UTILISATION

CHAISE D'ÉVACUATION LIGHT
(2 OU 4 ROUES)



1. Description du produit

1.1 Utilisation prévue

Les chaises d'évacuation LIGHT sont des dispositifs pour le transport des patients en position assise du point où l'incident a eu lieu jusqu'à l'ambulance. Il n'est donc pas permis d'utiliser ces chaises de transport à l'intérieur des véhicules d'urgence.

1.2 Composition des chaises d'évacuation

Composants	Matériaux	LIGHT (2 roues)	LIGHT (4 roues)
Repose-pieds avant	Acier	X	X
	PVC	X	X
Cadre	Acier	X	X
Mécanisme de sécurité contre fermeture accidentelle	Acier	X	X
Système d'ouverture et de fermeture	Acier	X	X
Roues arrières Ø 200 mm	Polyuréthane / caoutchouc	X	X
Roues avant pivotantes avec frein Ø 100 mm	Polypropylène		X

2. Mode d'emploi

2.1 Entreposage

Le dispositif doit être stocké dans un endroit sec, à l'abri de toute source de chaleur. Il ne doit pas être placé à proximité de produits chimiques qui pourraient endommager la chaise et réduire ses caractéristiques techniques et donc nuire la sécurité. Veillez à ne pas poser d'articles volumineux et lourds sur le dispositif.


2.2 Préparation du dispositif

L'appareil doit être vérifié avant chaque utilisation afin de révéler les anomalies de travail et/ou les dommages causés par le transport et/ou le stockage. Ainsi, avant chaque utilisation, vérifiez :

- Les fonctionnalités générales de l'appareil
- La propreté de l'appareil
- Absence de coupures, de trous, de larmes sur la structure, y compris les sangles
- Fermeture correcte des vis et boulons
- Fixation correcte des sangles
- Etat de l'usure (roues, housse, sangles...)
- Lubrification des pièces mobiles
- Etat de l'usure des roues et du système de freinage
- Etat des ressorts
- Les ceintures de sécurité pour l'immobilisation du patient sont présentes, intactes et fonctionnent
- Les soudures sont intactes

2.3 Ouverture du dispositif

1. Mettre le dispositif en position verticale
2. Tenez le côté de la tête du cadre avec la main droite et le siège avec la main gauche. Poussez les deux extrémités vers l'extérieur jusqu'à la serrure automatique
3. Activez le système de sécurité
4. Relâchez le frein des roues avant en appuyant sur la pédale rouge

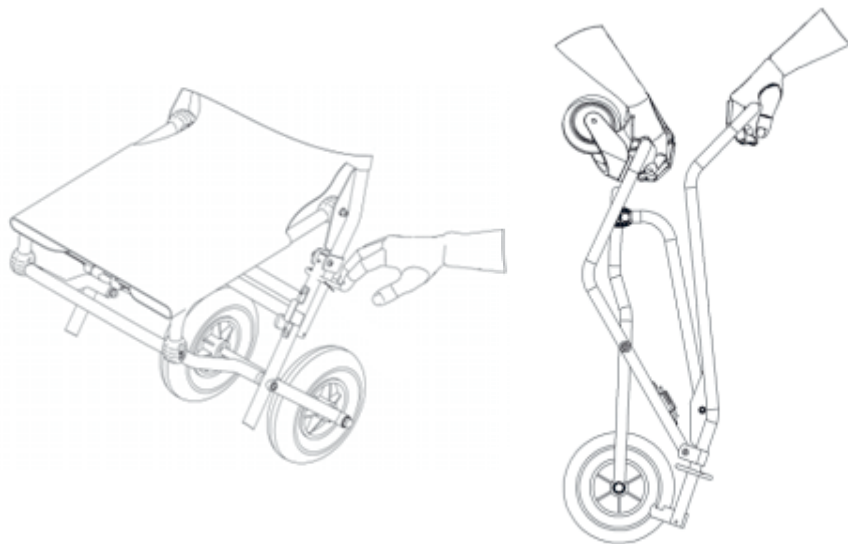

2.5 Transport des patients



1. Appliquez la notice en 2.3
2. La chaise doit être stable lorsque vous accueillez le patient. Faites attention que les roues ou le repose-pieds, selon le modèle, repose au sol
3. Veillez à bien attacher le patient grâce aux sangles de sécurité
4. Le premier opérateur doit se positionner à l'arrière de la chaise et tenir le cadre au niveau de la tête. Le second opérateur se tient face au patient à l'avant de la chaise et tient le cadre au niveau des pieds
5. Les opérateurs doivent lever simultanément la chaise pour commencer le transport

Attention : pour ce type de transport, un troisième opérateur est conseillé afin de guider les deux premiers.



2.4 Fermeture du dispositif

1. Bloquez les roues avant pivotantes avec le frein après les avoir tournées vers l'intérieur
2. Débloquez le système de sécurité en soulevant les anneaux
3. Pour fermer le dispositif, tirez sur la barre de mécanisme de mouvement

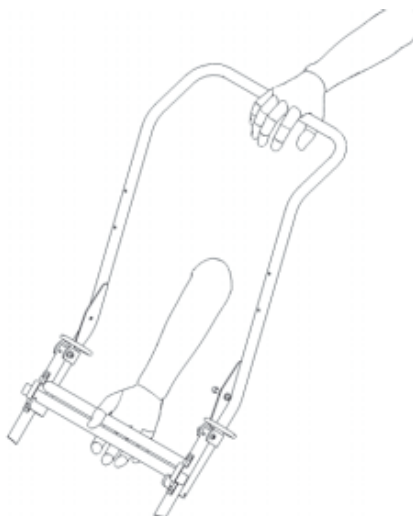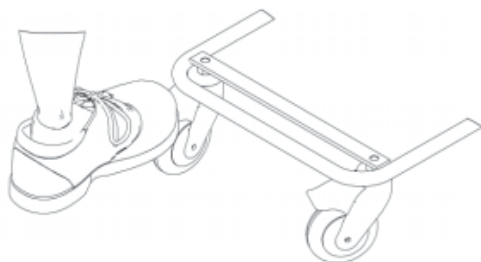

HandiNorme

L'accessibilité des ERP