

HandiNorme

Manuel utilisateur



Chaise d'évacuation EXCEL

Evacusafe™

innovation | manufacturing | training

Nous vous remercions de l'achat de votre EVACUSAFE EXCEL, et de prendre le temps de lire le contenu de ce livret, avant d'utiliser cette chaise d'évacuation.

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Voici les points préalables à prendre en compte :

- Qui va utiliser la chaise ?
- Où sera stockée la chaise ?
- Où est la sortie la plus proche en cas d'évacuation d'urgence ?
- Avons-nous assez de chaises pour faire face à toutes les situations ?

ATTENTION : *Ce fauteuil est conçu pour les escaliers qui ne sont pas affectés par des éléments externes.*

2. SPÉCIFICATIONS

Principales caractéristiques :

- Un seul opérateur
- Freins de sécurité sur les roues arrières
- Léger
- Assise confortable
- Minimum de manipulations
- Roulage à 4 roues sur sol plat
- Simple à installer et à utiliser
- Accoudoirs relevables
- Manoeuvrabilité polyvalente
- Repose-pieds
- Siège et appui-tête déhoussables
- Mécanismes de verrouillage codifiés (couleur rouge)
- Ceinture 3 points
- Housse de protection PVC épais
- Crochets de support fournis
- Sangle de maintien des jambes

ATTENTION : *Les courroies auto-freinées qui permettent de glisser dans les escaliers sont recouvertes de paraffine pour protection. Lors de la première utilisation vous devrez impérativement faire rouler le fauteuil à vide pour éliminer la paraffine présente sur les courroies.*

3. INFORMATION TECHNIQUE

Plié	Ouvert
Hauteur = 1130 mm	Hauteur = 1430 mm
Profondeur = 290 mm	Profondeur = 990 mm (max)
Largeur = 650 mm	Largeur = 650 mm

Poids = 13,6 kg, Capacité de charge = 182 kg
Giration à 360 degrés dans un diamètre de 1980mm

HandiNorme

4. MODE D'EMPLOI



①

MISE EN SERVICE

La chaise doit être à proximité de l'issue qu'elle dessert. Elle peut être suspendue aux crochets fournis ou adossée contre un mur.



②

Retirez la housse de protection et placez la chaise sur le sol.



③

Engagez le mécanisme de freinage en appuyant sur la pédale rouge, tel que montré sur l'image




④

Relâchez la sangle et ouvrez la chaise en position assise, ce qui libère le mécanisme. Assurez-vous qu'elle soit bien en place, en appuyant sur la barre avec les deux verrous rouges.



⑤

Ouvrez le repose-pieds

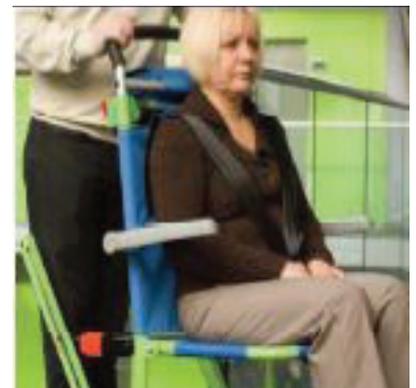

⑥

Transférez la personne sur la chaise, fixez le harnais et abaissez les accoudoirs.

HandiNorme



7

UTILISATION

Une fois que la personne est installée, libérez le mécanisme de frein en plaçant votre pied au-dessus de la pédale rouge et poussez vers le bas.



8

Rendez-vous à l'issue de secours, en poussant la chaise avec les mains positionnées sur la poignée.



9

À proximité de l'escalier, ouvrez les 2 leviers rouges. Relevez ensuite la barre de maintien, puis refermez les 2 leviers rouges. Veillez à ce qu'ils soient bien bloqués.




10

Placez vos mains de chaque côté de la poignée supérieure. Placez votre pied sur la barre transversale et tirez la poignée vers vous afin de mettre le fauteuil en équilibre sur les 2 roues arrières.



11

Avancez sur les 2 premières marches en veillant à ce que les patins soient en contact avec l'escalier.

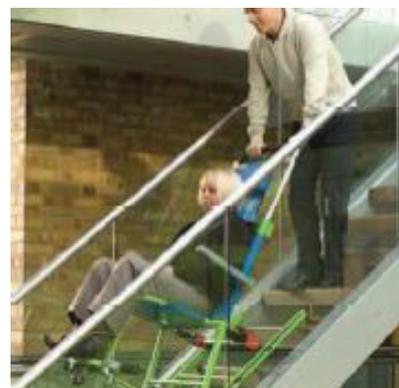

12

Pour descendre la chaise, poussez la poignée vers le bas vers vos pieds, ce qui assurera un contrôle en douceur de la descente.

HandiNorme



13

Une fois que vous atteignez un palier, repositionnez la chaise sur ses quatre roues. Répétez la manoeuvre sur la volée de marches suivante.



14

RANGEMENT

Assurez-vous que le mécanisme de frein est verrouillé.



15

Ouvrez les leviers rouges, abaissez doucement la poignée, puis refermez les leviers rouges jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent. Passez la ceinture de sécurité à travers et au-dessus de la poignée.



16

Repliez les accoudoirs. Libérez le mécanisme de verrouillage rouge entre les patins, appuyez la poignée supérieure vers l'avant et pliez l'ensemble de la chaise.



17

Verrouillez la ceinture de sécurité. Replacez la chaise à son emplacement de stockage et placez la housse de protection.

5. FIXATION MURALE DE LA CHAISE D'ÉVACUATION EVACUSAFE EXCEL

Tous les travaux doivent être exécutés conformément à la réglementation de sécurité au travail. Les indications ci-dessous ne sont que des suggestions de procédure.

Description des travaux :

L'objectif est de fixer la chaise EVACUSAFE EXCEL sur un mur ou tout autre poste fixe, cette tâche devant être effectuée par une personne habilitée.

La chaise d'évacuation EVACUSAFE doit être placée à l'emplacement désigné sur les plans d'évacuation d'urgence des bâtiments et/ou évaluation des risques d'incendie. Si ceux-ci n'existent pas, l'idéal est de les placer dans la partie supérieure de chaque cage d'escaliers accédant aux sorties de secours qui desservent le bâtiment.

Procédure :

- Identifiez la zone de mise en place de la chaise et des crochets fournis .
- Assurez-vous que la zone de fixation soit libre et n'inclue pas de fils électriques ou tuyaux avant de percer.
- Mesurez environ 70 cm du sol et tracez une ligne (ce sera le point le plus bas du crochet mural).
- Placez le premier crochet mural sur cette ligne et faites une marque.
- Mesurez 26.5 cm de la marque du premier crochet et faites une seconde marque (les 2 marques sont vos deux points de perçage).
- Utilisez la perceuse et le foret pour percer à une profondeur d'environ 45 mm.
- Placez une cheville fournie dans chaque trou.
- Placez le crochet au-dessus de la cheville et vissez fermement en utilisant les vis fournies.
- Assurez-vous que les crochets muraux soient sécurisés.
- Accrochez la chaise en positionnant la barre transversale entre les patins sur les crochets.
- Mettez la housse en place.

6. GARANTIE

EVACUSAFE UK Ltd assure une garantie pièces d'un an à la date d'achat (5 ans pour les patins). Les pièces endommagées par le vandalisme ou une mauvaise utilisation ne sont pas couvertes par la garantie. La chaise EVACUSAFE Excel nécessite un faible entretien, mais doit être vérifiée et entretenue régulièrement pour prolonger sa durée de vie.

7. ENTRETIEN

Les contrôles visuels à effectuer:

- Serrage de tous les écrous et boulons.
- Fonctionnement de la ceinture de sécurité.
- Ouverture, fermeture et blocage facile des leviers rouges.

- Ouverture et fermeture du fauteuil.
- Les courroies en caoutchouc tournent librement autour des galets.

ATTENTION : Il est recommandé que toutes les pièces en mouvement, en dehors des courroies, soient lubrifiées régulièrement.

Les contrôles ci-dessous doivent être effectués sur une base trimestrielle :

Élément	Vérification	Commentaires	OK ? Oui Non
Housse de protection	en place et non endommagée.		
Crochets muraux	solidement fixés au mur.		
Dépliage de la chaise	se déroule sans heurts.		
Repose-pieds	facilité d'ouverture et boulons sécurisés.		
Accoudoirs	basculer librement et sécuriser les boulons.		
Mécanisme des leviers rouges	s'ouvrent librement et permettent de déplacer la poignée de haut en bas. Se verrouillent et bloquent la poignée dans chaque position.		
Mécanismes de fermeture du fauteuil	s'ouvrent et se ferment aisément. Réengagement du mécanisme et verrouillage des patins.		
Leviers à ressort rouges	doivent être ouverts et pulvérisés avec un lubrifiant (ex: WD40).		
Ceintures de sécurité	tester les réglages, connections mâle et femelle, le bouton de déverrouillage, et que la sangle n'a pas de déchirures.		
Roue arrière freins	la pédale de frein rouge se verrouille et se déverrouille librement.		
Bandes de roulement	elles se déplacent en douceur autour des galets. Ils doivent être manoeuvrés régulièrement (au moins une fois par trimestre)		
Tissus des sièges	des fixations, propreté du tissu et absence de déchirures.		
Écrous / Boulons	qu'ils sont tous en place et sont bien serrés, que les capuchons de protection sont présents sur tous écrous visibles.		
Roues avant	veiller à ce que les roues tournent et soient en rotation libre.		
Roues arrières	roulent librement.		

Distributeur :

HandiNorme

37 avenue Albert Calmette
ZAC Ravennes les Francs
59910 Bondues
Tél : 03.66.72.41.50
Fax : 09 72 33 92 93
Site : <https://www.handinorme.com>

Fabricant :

Evacusafe™

innovation | manufacturing | training

Devonshire Business Park
9 Knights Park Rd
Basingstoke RG21 6XN
Royaume-Uni
Tél. : +44 1256 332723