

Barre D'appui Droite Color

Référence : 6880030

DESCRIPTION :


Existe en 4 couleurs : Bleu, Rouge, Vert et Jaune.

Existe en 4 dimensions : 30, 40, 50 et 60 cm.

Utile dans tous les sanitaires accueillant du public.

Ces barres d'appui sécurisent les WC et les douches pour toutes les personnes ayant des troubles moteurs.

Robuste grâce à son profil aluminium recouvert d'un PVC blanc

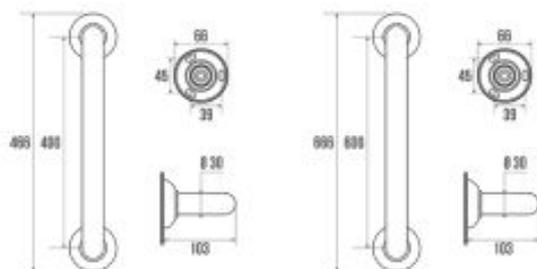

INFORMATION PRODUIT

Existe en 4 tailles et 4 couleurs

Utile dans tous les sanitaires accueillant du public.

Ces barres d'appui sécurisent les WC et les douches pour toutes les personnes ayant des troubles moteurs.

Robuste grâce à son profil aluminium recouvert d'un PVC blanc



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Les rosaces sont en polyamide et permettent de cacher la visserie de fixation.

Hauteur conseillée 80 cm du sol. Les barres droites peuvent s'installer à l'oblique (135°) ou à l'horizontale.

Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage.

Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural.

Caractéristiques :

- Profil aluminium recouvert PVC blanc, Ø 33 mm
- Rosaces polyamide
- Visserie inox fournie (5,5mm x 45 mm)
- Coloris : Bleu, Rouge, Vert, Jaune
- Garantie : 2 ans
- Nettoyage au savon doux ou désinfectant

Existe en 4 dimensions : 30, 40, 50 et 60 cm.

Existe en 4 couleurs : Bleu, Rouge, Vert et Jaune.

[Retrouvez la version blanche ici](#)

Ce que dit la loi

Chaque **cabine d'essayage et sanitaire** pour PMR doit disposer d'une **barre d'appui** permettant à l'utilisateur d'avoir un appui debout, de se baisser ou de se relever.

Les barres d'appui doivent comporter une **partie horizontale positionnée entre 0,70 et 0,80 m de hauteur**. Elles doivent supporter le poids d'un homme. Les barres d'appui coudées doivent avoir un **angle de 135°**.

Pour en savoir plus, consultez notre [article](#) sur l'aménagement des sanitaires pour PMR.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 6880030 Longueur (en mm) - 300, Couleur - Bleu

Réf. 6880037 Longueur (en mm) - 400, Couleur - Rouge

Réf. 6880038 Longueur (en mm) - 500, Couleur - Bleu

Réf. 6880041 Longueur (en mm) - 500, Couleur - Rouge



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Réf. 6880042 Longueur (en mm) - 600, Couleur - Bleu

Réf. 6880045 Longueur (en mm) - 600, Couleur - Rouge

Réf. 6880043 Longueur (en mm) - 600, Couleur - Vert

Réf. 6880032 Longueur (en mm) - 300, Couleur - Jaune



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com