

Barre D'appui Relevable Docca

Référence : 6880063

DESCRIPTION :

Utile dans tous les sanitaires accueillant du public.

2 tailles et 3 finitions au choix

Ces barres d'appui relevables sécurisent vos sanitaires pour toutes les personnes en situation de handicap moteur.

Robuste grâce à son profil aluminium recouvert d'un PVC blanc. Parfaitement adapté pour l'hôtellerie.



INFORMATION PRODUIT

Barre d'appui relevable DOCCA

Utile dans tous les sanitaires accueillant du public. Parfaitement adapté pour l'hôtellerie.

2 tailles et 3 finitions au choix

Ces **barres d'appui relevables** sécurisent vos sanitaires pour toutes les personnes en situation de handicap moteur.



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Robuste grâce à son profil aluminium recouvert d'un PVC blanc

Les rosaces sont en polyamide et permettent de **cache** la visserie de fixation.

Hauteur conseillée pour la barre supérieure : 80 cm dans les toilettes et la douche, ou à la hauteur du lavabo.

L'usage de la béquille est recommandé lorsque la paroi de fixation n'est pas solide. Il permet de consolider l'utilisation de votre barre relevable.

Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage.

Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural.

Caractéristiques :

- Fixations invisibles.
- Tube elliptique en aluminium blanc 38 x 25 mm renforcé.
- Support mural, articulation et cache en résine de synthèse blanc.
- Visserie fournie
- Nettoyage au savon doux ou désinfectant
- **3 finitions au choix**: Blanc, Gris (blanc chromé mat) ou Noir (Noir chromé brillant)
- **Tailles** : petit modèle (600 mm x 629 mm), grand modèle (700 x 800 mm)
- Il est préférable d'utiliser la béquille de soutien assortie Réf : 6880085
- charge admissible : 150kg
- garantie : 10 ans

Ce que dit la loi

Chaque **cabine d'essayage et sanitaire** pour PMR doit disposer d'une **barre d'appui** permettant à l'utilisateur d'avoir un appui debout, de se baisser ou de se relever.

Les barres d'appui doivent comporter une **partie horizontale positionnée entre 0,70 et 0,80 m de hauteur**. Elles doivent supporter le poids d'un homme. Les barres d'appui coudées doivent avoir un **angle de 135°**.

Pour en savoir plus, consultez notre [article](#) sur l'aménagement des sanitaires pour PMR.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 6880063 Couleur - Blanc, Taille - Petit

Réf. 6880064 Couleur - Blanc, Taille - Grand

Réf. 6880066 Couleur - Gris Clair, Taille - Grand

Réf. 6880067 Couleur - Noir, Taille - Petit



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com