

Barre D'appui Droite Wood 40 Cm


Référence : 6880089

DESCRIPTION :

Barre d'appui droite WOOD

Utile dans tous les sanitaires accueillant du public. Parfaitement adapté pour l'hôtellerie.

Ces barres d'appui sécurisent les WC et les douches pour toutes les personnes ayant des troubles moteurs.

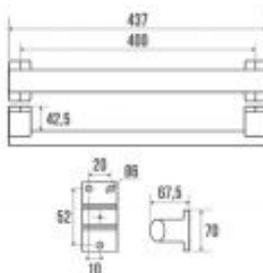

INFORMATION PRODUIT

Barre d'appui droite WOOD

Utile dans tous les sanitaires accueillant du public. Parfaitement adapté pour l'hôtellerie.

Ces barres d'appui sécurisent les WC et les douches pour toutes les personnes ayant des troubles moteurs.



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Hauteur conseillée 80 cm du sol. Les barres droites peuvent s'installer à l'oblique (135°) ou à l'horizontale.

Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage.

Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural.

Caractéristiques :

- Revêtement Soft, toucher doux
- Matière : Aluminium
- Finition : Epoxy
- Couleur : Gris anthracite et bois
- Dimension : 400 mm
- Diamètre : 38 x 25 mm
- Poids brut : 0,500 kg
- Poids net : 0,445 kg
- [Assortie au siège Design WOOD](#)
- Visserie fournie
- Garantie : 10 ans
- Nettoyage au savon doux ou désinfectant
- Fixations invisibles
- Platines et cache-fixations en résine de synthèse chromé mat
- Peut s'installer à l'horizontale ou à l'oblique
- Charge max : 150 kg
-

Ce que dit la loi

Chaque **cabine d'essayage et sanitaire** pour PMR doit disposer d'une **barre d'appui** permettant à l'utilisateur d'avoir un appui debout, de se baisser ou de se relever.

Les barres d'appui doivent comporter une **partie horizontale positionnée entre 0,70 et 0,80 m de hauteur**. Elles doivent supporter le poids d'un homme. Les barres d'appui coudées doivent avoir un **angle de 135°**.

Pour en savoir plus, consultez notre [article](#) sur l'aménagement des sanitaires pour PMR.

Conseils de pose :

Hauteur de pose conseillée : 80 cm du sol. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

Conseil d'entretien :



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

HandiNorme

L'accessibilité des ERP

Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. ATTENTION, NE PAS UTILISER des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com